

臨床検査に関するお知らせ

株式会社セントラル医学検査研究所

先生各位

平成 22 年 9 月

A-10-12

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。
また、平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
この度 下記検査項目につきまして試薬販売元より血清冷凍保存での測定におきまして、データに影響を与えるケースがあるとの連絡がありました。
そのため急ですが、検体材料、保存方法、採取容器を適切な内容に下記要領で変更させていただきますのでご案内申し上げます。
先生方には大変ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご了承賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

- ◆ 変更日 平成 22 年 9 月 6 日 (月) 受付分より
- ◆ 変更内容

2010 年 検査案内	項目 コード	検査項目	変更箇所	新	旧
P. 22	13030	HIV-1 定量 (リアルタイム PCR)	検体材料	血漿 3.5 ml	血清 3.5 ml
			保存方法	冷蔵	凍結
			採取容器	専用容器(下記参照)	47

専用	EDTA-2K・分離剤
採取量 8 ml	貯蔵方法 室温
添加剤 EDTA-2K・分離剤	有効期間 製造後 1 年
HIV-1 定量(リアルタイム PCR)	
【注意事項】	
1. 採血後、遠心分離を行い血球成分と血漿を確実に分離してください。 遠心条件：1200g±400g で 20 分間	
2. 採血後に採血管のキャップを開けないで下さい。(開封厳禁)	
※冷蔵にてご提出下さい。	

以上